


Skötselråd

TVÄTT

ProCare Pearl tyngdtäcke går att tvätta i 60°C i vanlig tvättmaskin. Vi rekommenderar fintvätt för maximal livslängd. Använd den medföljande tvättpåsen och häng upp täcket för att torka efter tvätt. Täcket kan även plantorkas.

Många tvättmaskiner har 6 till 8 kg som maxvikt. Täcken som väger mer än 6 kg kan därför delas på mitten genom en dragkedja. Vi rekommenderar att de två delarna av de delbara täckena tvättas separat.

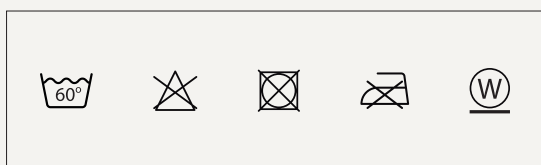

TRANSPORT & FÖRVARING

Använd den medföljande bomullsväska vid transport och förvaring av tyngdtäcket.

DESINFEKTION

OGH REKONDITIONERING

Rekonditionering och desinfektion sker med tvätt av tyngdtäcket i en temperatur på 70° (i mild process, och tvättpåse ska användas). Täcken som väger över 6 kg är delbara och varje del tvättas var för sig.

ProCare Pearl klarar minst 5 rekonditioneringar utöver normal tvätt och hantering.

TIPS! VIK IHOP TÄCKET

1. Lägg täcket på sängen.
2. Vik över ena långsidan till mitten på täcket.
3. Vik över andra långsidan till kanten på täcket.
4. Vik täcket från kortsidan i 3 delar.
5. Öppna hela dragkedjan på väskan och lägg ner täcket.