

# Användning av ProCare Tyngdtäcke Pearl och Boll med hygienöverdrag



Om du har fått ett hygienöverdrag som tillhör till ditt täcke kan du fästa det vid täcket genom att följa de tre stegen nedan. Du kan också scanna QR-koden längst upp på sidan med hjälp av din mobilkamera om du vill se en instruktionsfilm som visar hur du enklast fäster överdraget.

Använd inte hygienöverdrag till tyngdtäcket för personer med ofrivilliga rörelser eller barn då kvävningrisk kan föreligga. Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningrisk för användare med svag motorik när hygienöverdrag används.

1. Öppna påslakanet med hjälp av dragkedjan som löper runt tre av sidorna. På tyngdtäcket finns fästklykor i plast på samma avstånd som inuti påslakanet.
2. Lägg tyngdtäcket ovanpå påslakanet. Fäst påslakanet i tyngdtäcket med hjälp av fästklykorna.
3. Stäng igen påslakanet med hjälp av dragkedjan. Täcket sitter nu säkert fast inuti påslakanet och glider inte runt vid användning.

